



SWAT-T, TORNIQUETE

Extraordinario torniquete, efectivo, muy simple de utilizar, bajo peso y costo. **SWAT-T** es utilizado por agencias de policías, fuerzas armadas, bomberos y rescatistas.

Un torniquete extraordinariamente versátil permite uso **ADULTO, PEDIATRICO** y **CANINO**, opera mojado o cubierto de sangre, permite la autoaplicación.

- Fabricado en USA.
- Envase compacto 12 x 8 x 2 cm y liviano 95 gr.
- Opera entre -53°C y 83 °C.
- Valor 1/3 de los torniquetes tradicionales.
- Disponible en color naranja (SWAT-T-ORG) y negro (SWAT-T-BLK).
- Cumple normativa K9TCCC para uso en perros.



Muy versátil, permite aplicarlo en zonas cercanas a la axila o ingle, donde los torniquetes tradicionales no lo permiten; puede utilizarse para improvisar un vendaje de compresión (junto con un apósito) o una venda para inmovilizar una extremidad.

Rápida colocación: Abra la bolsa y retire el torniquete, de una vuelta en la extremidad envolviéndola, estire el torniquete elástico (hasta que los círculos se trasformen en elipses) y envuelva manteniendo la tensión, en la última vuelta use sus dedos para levantar el torniquete y lo introduce de forma que quede sujeto (cazado) por sí mismo.

