




**NUMASK IOM®** : Instrucciones de uso del dispositivo en RCP (se supone el socorrista está instruido en esta maniobra)




1: Eleve el borde lateral de los labios y deslizarse una solapa del IOM®



2: Tome y eleve el otro lado de labios para insertar el resto de la IOM®

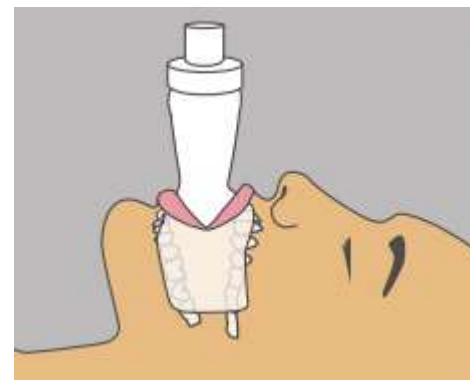

3: El IOM® debe estar sobre los dientes y detrás de los labios.

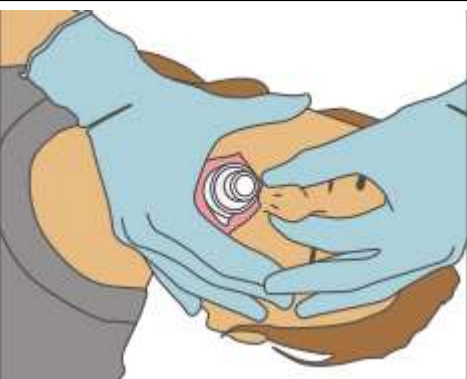

4: Los dedos y una mano rodean y cierran los labios alrededor del IOM®; con la otra mano cierra las fosas nasales.



5: Si no está contraindicado, coloque a la víctima en posición de inclinación de cabeza/elevación de mentón y luego realice el procedimiento de RCP.



PEDIATRÍA: Para bebés y niños, la máscara se coloca y se sella encima de la abertura de labios. La nariz se cierra con la otra mano.